
















## Précautions spécifiques aux ancillaires SWINGO

INSTRUMENTS			
CODE / LIBELLE	APERÇU	USAGE ATTENDU	PRECAUTIONS SPECIFIQUES
<b>A-COC-0001</b> Couteau a os COURBE		Réséquer les plateaux vertébraux	Pas de précautions particulières Attention à la partie tranchante
<b>A-COD-0001</b> COUTEAU A OS DROIT		Réséquer les plateaux vertébraux	Pas de précautions particulières Attention à la partie tranchante
<b>A-CUR-0002</b> CURETTE RONDE Ø30		Cureter le disque exposé	Attention à la partie coupante
<b>A-CUR-0003</b> CURETTE		Cureter le disque exposé	Attention à la partie coupante
<b>A-DAL-0007</b> <b>A-DAL-0008</b> <b>A-DAL-0009</b> <b>A-DAL-0010</b> <b>A-DAL-0011</b> <b>A-DAL-0012</b> DISTRACTEUR ALESOIR ht7 - ht8 – ht9 – ht10 – ht11 – ht12		Effectuer une distraction de l'espace intervertébral	Pas de précautions particulières A utiliser avec la poignée A-HTP-0002 Attention à la partie coupante Peut être remplacé par un A-DPE-10XX (DISTRACTEUR) de même hauteur
<b>A-DPE-1005</b> <b>A-DPE-1006</b> <b>A-DPE-1007</b> <b>A-DPE-1008</b> <b>A-DPE-1009</b> <b>A-DPE-1010</b> <b>A-DPE-1011</b> <b>A-DPE-1012</b> <b>A-DPE-1014</b> DISTRACTEUR ht5 – ht6 – ht7 ht8 – ht9 – ht10 – ht11 – ht12.5 –ht14		Effectuer une distraction de l'espace intervertébral	Pas de précautions particulières A utiliser avec la poignée A-HTP-0002 Peut être remplacé par un A-DAL-00XX (DISTRACTEUR ALESOIR) de même hauteur

INSTRUMENTS			
CODE / LIBELLE	APERÇU	USAGE ATTENDU	PRECAUTIONS SPECIFIQUES
<b>A-ECR-0002</b> ECARTEUR DE RACINES		Ecarter les racines	Pas de précautions particulières
<b>A-MAS-8430</b> MASSE D'EXTRACTION A MANCHE		Extraire le DISTRACTEUR DE FORME SWI-FA-XX	Pas de précautions particulières Peut être remplacé par un A-MAS-8460 (MASSE D'EXTRACTION)
<b>A-MAS-8460</b> MASSE D'EXTRACTION		Extraire le DISTRACTEUR DE FORME SWI-FA-XX	Pas de précautions particulières Peut être remplacé par un A-MAS-8430 (MASSE D'EXTRACTION A MANCHE)
<b>A-PIL-0002</b> PINCE INTERLAMAIRE		Ouvrir l'espace intervertébral	La pince doit être ouverte pour le nettoyage.
<b>A-PIM-0002</b> <b>A-PIM-0002-02</b> IMPACTEUR PORTE-IMPLANT, PORTE IMPLANT		Positionner la cage	Pas de précautions particulières A démonter lors de la phase de nettoyage
<b>A-POU-0001</b> <b>A-POU-6001</b> POUSSE CAGE		Positionner la cage	Pas de précautions particulières
<b>A-SUC-0004</b> SUPPORT DE REMPLISSAGE	/	Remplir la cage de greffon ou de substitut osseux synthétique	Pas de précautions particulières

INSTRUMENTS			
CODE / LIBELLE	APERÇU	USAGE ATTENDU	PRECAUTIONS SPECIFIQUES
<b>SWI-FA-07</b> <b>SWI-FA-08</b> <b>SWI-FA-09</b> <b>SWI-FA-10</b> <b>SWI-FA-11</b> <b>SWI-FA-12.5</b>  DISTRACTEUR DE FORME ht7 – ht8 – ht9 – ht10 – ht11 – ht12 –		Définir la taille de l'implant à utiliser	Pas de précautions particulières
<b>A-TGR-0001</b>  TASSE GREFFON		Tasser le greffon	Pas de précautions particulières  Attention à la surface moletée lors du nettoyage

MANCHES			
CODE / LIBELLE	APERÇU	USAGE ATTENDU	PRECAUTIONS SPECIFIQUES
<b>A-HTP-0002</b>  MANCHE SILICONE T23 1/4		Permettre l'utilisation des A- DAL-00XX et A-DPE-10XX	Pas de précautions particulières  A utiliser avec les A-DAL-00XX et A-DPE-10XX.  La poignée et l'instrument doivent être démontés lors de la phase de nettoyage.

BOITES			
CODE / LIBELLE	APERÇU	USAGE ATTENDU	PRECAUTIONS SPECIFIQUES
<b>BO-SWCOM-1</b>  Boîte instruments – Base / SWINGO	/	Ranger les instruments	Pas de précautions particulières
<b>BO-SWCOM-2</b>  Boîte instruments – Insert / SWINGO	/	Ranger les instruments	Pas de précautions particulières
<b>SWI-BO</b>  Boîte instruments – Insert / SWINGO	/	Ranger les instruments	Pas de précautions particulières