


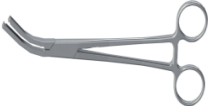



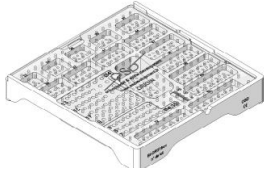


Précautions spécifiques aux ancillaires ORIGIN

INSTRUMENTS			
CODE / LIBELLE	IMAGE	USAGE ATTENDU	PRECAUTIONS SPECIFIQUES
A-CPL-0002 CINTREUSE DE PLAQUE ORIGIN		Ajuster la courbure les plaques (Réf : PCEV-00XX)	La pince doit être ouverte pour le nettoyage.
A-FAB-0001 FORET A BUTEE Ø2.5		Effectuer les trous pour le passage des vis (Réf : VPCE-00XX et VREV-00XX) Utiliser cet ancillaire ou la pointe ronde Ig12 (Réf : A-SQA-0025)	Faire attention à la partie coupante Connexion sur un guide de perçage (ref : A-GPS-0001)
A-GPS-0001 GUIDE PERÇAGE SIMPLE		Guider le foret à butée Ø2.5 (Réf : A-FAB-0001)	Pas de précautions particulières partie coupante.
A-PPL-0001 PINCE PORTE PLAQUE		Saisir les plaques (plaque cervicale antérieure : PCEV-00XX) pour les positionner sur le patient	La pince doit être ouverte pour le nettoyage.
A-SQA-0025 POINTE RONDE Ig12		Percer le corps vertébral et montrer l'emplacement des vis pédiculaires (Réf : VPCE-00XX et VREV-00XX) Utiliser cet ancillaire ou le foret à butée Ø2.5 (Réf : A-FAB-0001)	Ne pas utiliser sur un os de mauvaise qualité.
A-TPC-0001 TOURNEVIS PLAQUE ORIGIN		Assurer la rotation des systèmes de verrouillage des plaques cervicales (Réf : PCEV-00XX)	Pas de précautions particulières
A-TPC-0002 / A-TPC-0002-02 TOURNEVIS POUR VIS ORIGIN / RESSORT MAINTIEN POUR TOURNEVIS ORIGIN		Visser et dévisser les vis (Réf : VPCE-00XX et VREV-00XX) dans la plaque cervicale	Le ressort de maintien (Réf : A-TPC-0002-02) doit être démonté pour la réalisation du nettoyage

BOITES			
CODE / LIBELLE	IMAGE	USAGE ATTENDU	PRECAUTIONS SPECIFIQUES
ORG-BO ORIGIN - BOITE INSTRUMENTS - BASE	/	Ranger les ancillaires	Ne rien coller ou écrire sur la boîte, le couvercle et son contenu
BI-ORG1B01 BOITE A IMPLANTS ORIGIN		Ranger les implants	Ne rien coller ou écrire sur la boîte, le couvercle et son contenu