

Précautions spécifiques aux ancillaires SQUALE

INSTRUMENTS			
CODE / LIBELLE	IMAGE	USAGE ATTENDU	PRECAUTIONS SPECIFIQUES
A-IMS-0001 A-IMS-0001-02 IMPACTEUR PORTE IMPLANT PORTE IMPLANT		Positionner les cages (Réf : SQP-CP-1413XX / SQA-CP-17XX / SQA-CP- 20XX)	Démontage pour le nettoyage : dévisser le porte implant de l'impacteur Faire attention aux parties filetées
SQA-IM IMPACTEUR DISTRACTEUR DE FORME		Insérer les distracteurs de forme (Réf : SQA-FA-XXXX)	Faire attention aux parties filetées
A-POU-0002 POUSSE CAGE A BUTEE		Pousser les cages (Réf : SQP-CP-1413XX / SQA-CP-17XX / SQA-CP- 20XX)	Faire attention aux parties filetées
SQA-FA-141304 SQA-FA-141305 SQA-FA-141306 SQA-FA-141307 SQA-FA-141308 DISTRACTEUR DE FORME T14x13x04 T14x13x05 T14x13x06 T14x13x07 T14x13x08		Déterminer la taille de la cage T14 à utiliser	Pas de précautions particulières
SQA-FA-1704 SQA-FA-1705 SQA-FA-1706 SQA-FA-1707 SQA-FA-1708 SQA-FA-1709 DISTRACTEUR DE FORME T17x13x04 T17x13x05 T17x13x06 T17x13x07 T17x13x08 T17x13x09		Déterminer la taille de la cage T17 à utiliser	Pas de précautions particulières

INSTRUMENTS			
CODE / LIBELLE	IMAGE	USAGE ATTENDU	PRECAUTIONS SPECIFIQUES
SQA-FA-2004 SQA-FA-2005 SQA-FA-2006 SQA-FA-2007 SQA-FA-2008 DISTRACTEUR DE FORME T20x15x04 T20x15x05 T20x15x06 T20x15x07 T20x15x08		Déterminer la taille de la cage T20 à utiliser	Pas de précautions particulières

BOITES			
CODE / LIBELLE	IMAGE	USAGE ATTENDU	PRECAUTIONS SPECIFIQUES
<p>SQA-2-BO</p> <p>SQUALE - BOITE DE RANGEMENT DOUBLE - RACK</p>		<p>Ranger les ancillaires</p>	<p>Ne rien coller ou écrire sur la boîte, le couvercle et son contenu</p>