










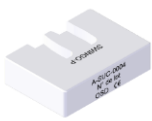





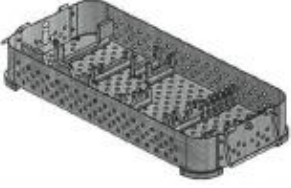

Précautions spécifiques aux ancillaires SWINGO

INSTRUMENTS			
CODE / LIBELLE	APERÇU	USAGE ATTENDU	PRECAUTIONS SPECIFIQUES
A-COC-0001 Couteau a os COURBE		Réséquer les plateaux vertébraux	Attention à la partie tranchante
A-COD-0001 COUTEAU A OS DROIT		Réséquer les plateaux vertébraux	Attention à la partie tranchante
A-CUR-0002 CURETTE RONDE Ø30		Cureter les disques exposés	Attention à la partie coupante
A-CUR-0003 CURETTE		Cureter les disques exposés	Attention à la partie coupante
A-DAL-0007 A-DAL-0008 A-DAL-0009 A-DAL-0010 A-DAL-0011 A-DAL-0012 DISTRACTEUR ALESOIR ht7 - ht8 – ht9 – ht10 – ht11 – ht12.5		Effectuer une distraction des espaces intervertébraux	A utiliser avec le manche silicone T23 1/4" (Réf : A-HTP-0002) Attention à la partie coupante Peut être remplacé par un distracteur (Réf : A-DPE-10XX) de même hauteur
A-DPE-1005 A-DPE-1006 A-DPE-1007 A-DPE-1008 A-DPE-1009 A-DPE-1010 A-DPE-1011 A-DPE-1012 A-DPE-1014 DISTRACTEUR ht5 – ht6 – ht7 – ht8 – ht9 – ht10 – ht11 – ht12.5 –ht14		Effectuer une distraction des espaces intervertébraux	A utiliser avec le manche silicone T23 1/4" (Réf : A-HTP-0002) Peut être remplacé par un distracteur (Réf : A-DAL-00XX) de même hauteur

INSTRUMENTS

CODE / LIBELLE	APERÇU	USAGE ATTENDU	PRECAUTIONS SPECIFIQUES
A-MAS-8430 MASSE D'EXTRACTION A MANCHE		Extraire les distracteurs de forme (Réf : SWI-FA-XX)	Peut être remplacé par une masse d'extraction (Réf : A-MAS-8460)
A-MAS-8460 MASSE D'EXTRACTION		Extraire les distracteurs de forme (Réf : SWI-FA-XX)	Peut être remplacé par une masse d'extraction à manche (Réf : A-MAS-8430)
A-PIM-0002 A-PIM-0002-02 IMPACTEUR PORTE-IMPLANT, PORTE IMPLANT		Positionner les cages (Réf : SAW-XX22100 / SAW-XX28100 et SWI-XX)	A démonter lors de la phase de nettoyage
A-POU-0001 POUSSE CAGE		Positionner les cages Swingo-P (Réf : SAW-XX22100 et SAW-XX28100)	Pas de précautions particulières
A-POU-6001 POUSSE CAGE		Positionner les cages Swingo-T (Réf : SWI-XX)	Pas de précautions particulières
A-SUC-0004 SUPPORT DE REMPLISSAGE		Remplir les cages (Réf : SAW-XX22100/ SAW-XX28100 et SWI-XX) de greffons ou de substituts osseux synthétiques	Pas de précautions particulières
SWI-FA-07 SWI-FA-08 SWI-FA-09 SWI-FA-10 SWI-FA-11 SWI-FA-12.5 DISTRACTEUR DE FORME ht7 – ht8 – ht9 – ht10 – ht11 – ht12 –		Définir la taille de la cage (Réf : SWI-XX) à utiliser	Pas de précautions particulières
A-TGR-0001 TASSE GREFFON		Tasser les greffons dans les cages (Réf : SAW-XX22100/ SAW-XX28100 et SWI-XX)	Attention à la surface moletée lors du nettoyage

MANCHES			
CODE / LIBELLE	APERÇU	USAGE ATTENDU	PRECAUTIONS SPECIFIQUES
A-HTP-0002 MANCHE SILICONE T23 1/4"		Permettre l'utilisation des A-DAL-00XX et A-DPE-10XX	La poignée et l'instrument doivent être démontés lors de la phase de nettoyage

BOITES			
CODE / LIBELLE	APERÇU	USAGE ATTENDU	PRECAUTIONS SPECIFIQUES
BO-SWCOM-1 Boîte instruments – Base / SWINGO		Ranger les instruments	Ne rien coller ou écrire sur la boîte, le couvercle et son contenu
BO-SWCOM-2 Boîte instruments – Insert / SWINGO		Ranger les instruments	Ne rien coller ou écrire sur l'insert et son contenu